

La Bouillotte française, vous propose

Un modèle multi-positions ;

Une bouillotte sèche revisitée, qui s'adapte à toutes les morphologies, par nouage de ses liens, et se positionne facilement sur toutes les zones du corps (dos, ventre, nuque, etc....)

Réalisé dans une toile en coton 100%, fabriqué par nos soins dans notre atelier de couture, notre modèle est exclusivement garni de grains de blé de la région cultivés de manière raisonnée, pour une utilisation saine et efficace.

Le blé offre une excellente restitution de la chaleur grâce à l'huile qu'il contient et apporte à notre bouillotte toute la souplesse nécessaire à son confort.

-Chauffée au four micro-ondes, au four traditionnel ou encore sur un radiateur, elle vous apaise en cas de douleurs dorsales, maux de ventre, règles douloureuses, arthrose, arthrite, rhumatisme, tension musculaire...

-Refroidie au congélateur, elle vous soulage en cas de migraine, entorse, ecchymose ou contusion...
La bouillotte offre ainsi de multiples possibilités d'utilisation.

Offrez vous un instant de bien être,

Osez offrir un moment de douce chaleur à ceux que vous aimez, soyez bienveillants.

Conseils d'utilisation : (pour la première utilisation ,faire un test de chauffe par palier de 30 secondes)

Chaude : Humidifiez légèrement votre bouillotte (mouillez la avec la main ou vaporisez la).

Placez-la dans un plat recouvert d'un torchon propre pour la protéger des graisses.

Déposez-la dans un four traditionnel ou dans un four micro-ondes.



Bouillotte non déhoussable	micro-ondes 600w-700w	four à 90° sans préchauffage
multi-positions environ 1kg	2min à 2min30 max	20min max

Respectez les temps de chauffage indiqués dans le tableau ci-dessus.

Toujours surveiller votre bouillotte en prenant soin de vérifier la chaleur de celle-ci en cours de chauffage afin d'éviter tout risque de brûlure ou d'incendie.

Ne pas la chauffer plus de 3 fois sans la laisser complètement refroidir.

Vous pouvez également chauffer votre bouillotte sur un radiateur, un poêle ou un sèche-serviettes pas trop chaud, et toujours sous surveillance.

N.B. Vous pouvez mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle dans l'eau de votre vaporisateur pour parfumer votre bouillotte et soigner en même temps les affections de la vie courante.

Pour préserver votre bouillotte d'éventuelles salissures, nous vous conseillons de la protéger d'un linge propre lors de son utilisation.

Froide : Placez votre bouillotte dans un sachet plastique hermétique et déposez la au freezer ou au congélateur 45 mn maximum.

Bouillotte sèche multi-positions

Garniture : grains de blé sans OGM et sans traitement post récolte

Utilisation : chaude ou froide (four traditionnel/micro-ondes/radiateur) (freezer/congélateur)

Type : non déhoussable

Nettoyage : non lavable en machine *

Composition enveloppe : coton 100%

Fabriqué en Périgord ,à Domme



*Pour nettoyer votre bouillotte, saupoudrez la de bicarbonate de soude après l'avoir légèrement humidifié, et frottez la avec une brosse douce.

www.labouillottefrancaise.fr

Facebook : La Bouillotte Française

boutique «6 Grand' Rue » 24250 DOMME